

90 mm

“海昌”牙創保護材

"Horien" Gennu-Plug
Absorbable Wound Dressings Protector for Dentistry

使用前請務必詳閱使用說明書並遵照指示使用

產品敘述

衛署醫器製字第002787號

本產品Gennu-Plug萃取自豬體的膠原蛋白，經由升溫脫水、紫外光照射以及冷凍乾燥的處理方式，使結構產生交聯作用。擬自然態的膠原蛋白依其恆定與生物相容性佳的特徵，廣泛適用於醫療相關產品。Gennu-Plug多孔海綿態的外型特色有助移植治療中對於術後傷口的修復。Gennu-Plug的設計理念是為了便於術中操作，加強拔牙術後對傷口的安全處理。

產品機制

天然之膠原蛋白特性會促進血小板凝聚、活化，高度多孔性海綿狀構造可吸收滲出之血/體液、提供立體結構空間促進血塊凝集並加強其凝集強度，同時藉由加壓止血的物理性機制，可幫助傷口止血。置Gennu-Plug於拔牙傷口，可保護傷口表面、防止傷口受到感染，不需再次手術取出，有助於術後的恢復，同時可保留空間給齒槽骨生長。

主成分

膠原蛋白

適應症

保護拔牙後傷口表面；止血；保留空間給齒槽骨生長

禁忌

凡對自豬萃取的蛋白質過敏者應該避免使用。

警示

- 1.本產品需經醫師使用。
- 2.勿重複使用，只供單次使用。
- 3.本產品經γ輻射滅菌，為無菌產品，若外包裝毀損或是產品受損，請勿使用。
- 4.勿直接接觸。
- 5.包裝開封後，若非立即使用，則應棄之。

1

- 6.審慎評估幼兒、孕婦以及對豬製之膠原蛋白會產生氣喘或是其他過敏反應的病患。
- 7.當病患產生蕁麻疹、假膜性喉頭炎、搔癢症、紅斑或其他過敏反應，應當立即停止使用或是由傷口處取出。
- 8.屬於無菌產品、非抗菌產品，當要同時使用抗生素或是其他抗發炎藥物的治療，則應當審慎評估。

產品用法

1.開啟/撕開產品包裝。2.藉由滅過菌的鉗子將Gennu-Plug置放於拔牙處之傷口，依情況需求，清除傷口附近壞死的組織。3.最後可藉由漱口或其他方法來減少感染的危險。

保存方式

保存期限3年；儲放產品於25℃以下，乾燥處，勿加熱或是直接受到陽光曝曬。

規格

型號	尺寸	型號	尺寸
GP028315	8.3*15mm	GP021525	15*25mm
GP988320	8.3*20mm	GP020604	6*4mm
GP978330	8.3*30mm	GP020704	7*4mm
GP021020	10*20mm	GP020804	8*4mm
GP021025	10*25mm	GP02EP20	epdf 20mm
GP021515	15*15mm	GP02EP25	epdf 25mm
GP021520	15*20mm		

核定日期：104.4.20

 HORIENT

製造廠/藥商名稱 海昌生化科技股份有限公司
製造廠/藥商地址 台中市西屯區協和里工業區38路210號7樓之5

2

90mm x 130 mm

C100 M80 Y0 K0

C100 M0 Y0 K0

C100 M100 Y0 K0